

medikey®



- i trygge hender

- Hygienisk

- Sikrere

- Enklere

- Raskere




Bruksområder:

- Åpne propp og lokk til PVK og diverse andre koblinger
- Passer til koblinger for kontrastvæske og mer
- Skånsom pinsett

Medikey er et medisinteknisk hjelpemiddel som kan tas i bruk av sykehus og helsetjenester både offentlig og privat.



1. Tre Medikey inn på proppen.

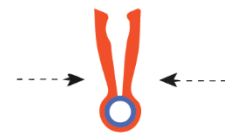

2. Klem lett på hver side når Medikey er på propp.



3. Vri rundt for å løsne på propp.



4. Fjern propp.

«Medikey er en liten plastnøkkel spesielt laget for å åpne/løsne proppen på PVK. På innsiden av nøkkelens sirkel, er det små tagger som griper rundt proppen. Ved å stramme grepet rundt endene av Medikey og samtidig vri rundt, vil proppen løsne. Ingen bruk av tenger som vrir seg, sakser eller annet. Medikey sin utforming gjør at den er lett å tre inn på intravenøsslengen ved behov. Medikey er et CE-merket usterilt engangsprodukt. Billig i innkjøp, alltid for hånden og sikker i bruk.»

Rano-Erica Henden

- Tidligere avdelingssykepleier
sterilsentralen, Sørlandet sykehus
Kristiansand.

«Jeg har vært så heldig og fått prøve Medikey og jeg må bare si at den er genial. Den er designet spesielt til formålet og gjør jobben uten besvær. Prinsippet er enkelt og bruken blir da også svært enkel. Den har flere formål og forårsaker ikke skade på pasient eller utstyr. Fordi den er en engangsnøkkel så er det heller ikke risiko for smitteoverføring. Jeg vil ikke være foruten en Medikey når jeg er på jobb.»

Irene E. Leifsdottir

– Sykepleier, 24 års erfaring

Kontakt:

post@medikey.no | 95 07 43 33

Produksjon og pakking gjøres lokalt i Norge

Art nr:	Produktbeskrivelse:	Forpakning:	Antall:
300MK	MEDIKEY ROSA	SINGLE PACK	300
301MK	MEDIKEY ROSA	BULK	500
310MK	MEDIKEY BLÅ	SINGLE PACK	300
311MK	MEDIKEY BLÅ	BULK	500
320MK	MEDIKEY RØD	SINGLE PACK	300
321MK	MEDIKEY RØD	BULK	500
330MK	MEDIKEY SVART	SINGLEPACK	300
331MK	MEDIKEY SVART	BULK	500
390MK	MEDIKEY MIX AV FARGER	SINGLE PACK	300
391MK	MEDIKEY MIX AV FARGER	BULK	500

Evalueringskiema

www.medikey.no

